

INDICAID[®] OTC

PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE COVID-19 PARA USAR EN CASA



INDICAID[®] OTC es una prueba no invasiva, rápida, para usar en casa. Es un método económico, preciso, y conveniente de detectar COVID-19. La portabilidad de INDICAID, su fácil uso, y la posibilidad de autorrecolectar la muestra hacen que sea una de las formas más eficaces de brindar tranquilidad tanto a los usuarios como a los pacientes.

INDICAID[®] llega en Presentación de 2 Pruebas y en Presentación de 12 Pruebas


MÉTODO DE USO

01




Hisope suavemente para recolectar la muestra

02

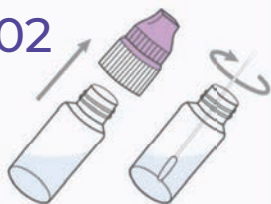

Inserte el hisopo y agite

03

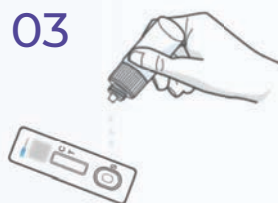

Coloque la muestra en el dispositivo de análisis

04



Positivo Negativo Inválido
Lea el resultado

INDICAID[®] OTC VENTAJAS

FÁCIL DE USAR

- INDICAID es fácil de usar, no requiere capacitación ni equipo especial

RESULTADO RÁPIDO

- Brinda resultados en solo 20 minutos

APROBADA

- La FDA de EE. UU. aprobó el Uso de Emergencia(EUA) con el Número: #EUA220152SENCILLA

SENCILLA DE USAR

- Proceso intuitivo de autorrecolección de muestras nasales poco profundas

CONVENIENTE

- Permite a los usuarios y pacientes realizar la prueba en la comodidad de sus hogares

VALOR

- ✓ Económico
- ✓ Preciso
- ✓ Accesible
- ✓ Rentable

BENEFICIOS

- ✓ No requiere equipo
- ✓ Alta sensibilidad
- ✓ Alta especificidad
- ✓ Mayor comodidad

UTILÍCELO CUANDO

- ✓ Tenga síntomas de Covid-19
- ✓ Quiera proteger a otros
- ✓ Deba tomar decisiones con respecto a la salud

INDICAID[®] OTC les brinda tranquilidad a los usuarios y pacientes.

DESEMPEÑO CLÍNICO

La FDA de EE.UU. anunció recientemente la aprobación del uso de emergencia (EUA) de la prueba Rápida de Antígeno de COVID-19 para usar en casa INDICAID[®] que permite hacer pruebas en serie en personas asintomáticas. La actualización amplía el uso de INDICAID[®] como prueba de detección, por lo que brinda una nueva opción precisa y confiable para las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades, los prestadores de atención médica y los usuarios.

“Rompe el mito de que las pruebas de antígenos solo detectan el virus en pacientes con síntomas, y demuestra que las pruebas de antígeno de alta calidad pueden ser sensibles, precisas y confiables para realizar pruebas de detección en la población.”

*Se evalúa en forma continua el rendimiento del producto frente a las nuevas variantes.



Además de las pruebas rápida para usar en casa, contamos con pruebas rápidas para los puntos de atención (PoC) disponibles en el ámbito sanitario. Estos dos productos INDICAID se complementan para promover una forma de vida más saludable.

COSTOS DE ENVÍO ADICIONALES

DIRIJA SU ORDEN DE COMPRA A:

PHASE Diagnostics, Inc.
DBA PHASE Scientific Americas
10527 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92543

Números NDC (Código Nacional de medicamento):
Presentación de 2: 60008-0407-80
Presentación de 12: 60008-0407-81

PRUEBA RÁPIDA INDICAID[®] EMBALAJE Y ENVÍO

FORMATO	2 PRUEBAS			12 PRUEBAS		
Kits / Caja	126			36		
Pruebas / Caja	252			432		
Cajas / Paletas	24			24		
Pruebas / Paletas	6,048			10,368		
DIMENSIONES	2 PRUEBAS			12 PRUEBAS		
	LARGO	ANCHO	ALTURO	LARGO	ANCHO	ALTURO
Tamaño Kit (cm.)	20.32	2.54	6.60	20.50	9.10	6.60
Tamaño Caja (cm.)	56.90	44.00	22.00	57.00	42.00	22.00
Tamaño Paleta (cm.)	121.92	101.60	149.86	121.92	101.60	149.86
Peso Kit (kg.)	0.22			0.36		
Peso / Caja (kg.)	8.16			8.16		
Peso / Paleta (kg.)	173.40			173.40		

“La versión profesional de INDICAID[®] para los puntos de atención (PoC) se utiliza ampliamente en EE.UU. para satisfacer la necesidad de pruebas de emergencia en una variedad de contextos, en escuelas, sitios de pruebas móviles, redes de clínicas médicas y hospitales”, afirma el Dr. Ricky Chiu, Fundador y Director General de PHASE Scientific Int.Ltd. “Vemos la aprobación de INDICAID[®] para usar en casa sin prescripción como una forma de expandir el uso de nuestro producto a la vida diaria, y así promover aún más la lucha contra la pandemia”.

ACERCA DE PHASE Scientific Americas

PHASE Scientific es una empresa de biotecnología de alto crecimiento fundada por bioingenieros de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Creamos herramientas que empoderan a las personas brindándoles más y mejor información sobre su salud.

1.877.934.9344
ussales@phasesci.com
phasescientificamericas.com

PHASESCIENTIFIC

Inspiramos un nuevo estado de salud